



# Instrucțiuni pentru mulaje

**Asigură-te că ai acest ghid cu tine la Audiolog!** Il va ajuta pe acesta să înțeleagă cât mai bine ceea ce avem nevoie pentru a construi cele mai bune Monitoare In Ear pentru tine.

- Avem nevoie de mulajul complet al ambelor urechi: helixul complet, crusul de helix, tragus și antitragus. Mulajul trebuie luat complet, până la cea de a doua curbură a canalului urechii.
- Canalul urechii trebuie examinat pentru orice obstrucții sau inflamații (dacă există, vă recomandăm să nu continuați cu procedura).
- Se introduce un oto-block, imediat după cea de a doua curbură a canalului urechii.
- Se recomandă folosirea unui bite-block, astfel încât pacientul să aibă maxilarul deschis în jurul a 2,5 cm în timp ce se realizează mulajul. Astfel, Monitoarele In Ear vor avea cea mai bună poziție în ureche, precum și o etanșare ideală.
- Pentru a avea exact ceea ce trebuie de la un mulaj, acesta trebuie făcut din silicon; noi recomandăm unul cu vâscozitate ridicată.

**Anunță-ne când mulajele sunt gata!**